

DAS PREMIUM-PROPHYLAXE-SYSTEM

LUNOS[®]

VOR FREUDE STRAHLEN



LUNOS® – STRAHLENDES LÄCHELN FÜR ALLE.

LUNOS®
VOR FREUDE STRAHLEN

Lunos® ist das neue Premium-Prophylaxe-System von Dürr Dental. Mit dem uns eigenen Anspruch – das Beste hat System – haben wir eine umfassende Lösung entwickelt, die Prophylaxe effektiver, bequemer und flexibler macht. Das Ergebnis: Der Praxisalltag wird spürbar entspannter. Natürlich steckt in allen Lunos® Produkten und dem begleitenden Beratungsservice höchste Premiumqualität, damit eins sicher ist: strahlendes Lächeln bei Prophylaxe-Spezialisten, Zahnarzt und Patienten.



VOR FREUDE STRAHLEN: DIE PROPHYLAXE-SPEZIALISTEN

Das Lunos® Prophylaxe-System ermöglicht effektive und zeitsparende Behandlungen bei gleichzeitiger Schmerzarmut bei den Patienten. Für einen entspannten Praxisalltag sorgen Anwendungssicherheit und überzeugende Produkteigenschaften.

Schulungen, umfassende Beratung und Zubehör gehören ebenfalls zum Lunos® Prophylaxe-System. Lunos® ist damit nicht nur ein leistungsstarker Teamplayer, sondern ermöglicht mit seinem hohen Komfortfaktor gute Stimmung im Praxisteam und erfolgreiche Patientenbeziehungen.

VOR FREUDE STRAHLEN: DER ZAHNARZT

Unsere Lunos® Produkte erfüllen höchste medizinische Ansprüche, was Produktleistung und Inhaltsstoffe angeht. Somit stehen sie für höchste Anwendungssicherheit und besonders effizientes Arbeiten. Der daraus resultierende Behandlungserfolg fördert eine langfristige Patientenbindung. Darüber hinaus verhindert die gute Wasserlöslichkeit des Pulvers Funktionsbeeinträchtigungen von Sauganlage und Amalgamabscheider.

Somit sorgt Lunos® für glänzende Ergebnisse: in Ihrer Praxis und bei Ihren Patienten.

VOR FREUDE STRAHLEN: DIE PATIENTEN

Von der schonenden Lunos® Behandlungsphilosophie sowie den hervorragenden medizinischen Eigenschaften profitieren Ihre Patienten spürbar. Das sorgt rundum für Zufriedenheit und strahlendes Lächeln.

STRAHLEN MIT SYSTEM: DER LUNOS® PROPHYLAXE-KREISLAUF.

Bei Lunos® findet sich der Systemgedanke in allen Details. In den präzise aufeinander abgestimmten Prophylaxe-Produkten und MyLunos, dem speziell dafür entwickelten Pulver-Wasserstrahl-Handstück. Somit ermöglicht Lunos® einen besonders effizienten Praxis-Workflow und sorgt für Zufriedenheit beim gesamten Praxisteam.

1 VORBEREITENDE MASSNAHMEN

Lunos® Mundspüllösung. Hemmt das Wachstum plaquebildender, pathogener Keime, beugt bakteriell bedingten Entzündungen vor.

Lunos® Prophy-Kissen. Macht die Behandlung besonders bequem.

Lunos® Prophy-Wellnesstuch. Ideal für die Gesichtsreinigung nach der Behandlung.

6 MEDIKAMENTÖSE THERAPIE, BEGLEITENDE MASSNAHMEN

Lunos® Fluoridlack. Natriumfluorid desensibilisiert und schützt zuverlässig überempfindliche Zahnoberflächen.

Lunos® Fluoridgel. Erhöht die Säureresistenz des Zahnschmelzes, hemmt die Plaque-Neubildung und trägt zur Remineralisierung bei.

5 FISSURENVERSIEGELUNG

Lunos® Fissurenversiegelung. Für wirkungsvollen Kariesschutz an den besonders gefährdeten Fissuren.

2 SUPRAGINGIVALE REINIGUNG

MyLunos und Lunos® Prophylaxepulver Gentle Clean. Für die sanfte und effektive Entfernung von Verfärbungen.

3 SUBGINGIVALE REINIGUNG

Lunos® Prophylaxepulver Perio Combi. Für die Entfernung von subgingivalem Biofilm – auch in tiefen Parodontaltaschen – und die schonende Entfernung von leichten supragingivalen Verfärbungen. Die Düse des MyLunos ist momentan ausschließlich für die supragingivale Behandlung verfügbar. Perio-Düse für den subgingivalen Einsatz bald erhältlich.

4 POLITUR

Lunos® Polierpaste Two in One. Entfernt effektiv Verfärbungen und poliert in nur einem Arbeitsschritt.

Lunos® Polierpaste Super Soft. Sanfte Politur für besonders empfindliche Oberflächen.

Lunos® Prophy-Ring. Zur einfachen und ergonomischen Applikation der Polierpaste.

MYLUNOS. FÜR DEN PERFEKTEN ARBEITSFLOW.

MyLunos ist von Grund auf so konzipiert, dass nur wenige Behandlungsunterbrechungen notwendig sind. Mit dem speziell für das Lunos® Prophylaxe-System entwickelten Pulver-Wasserstrahl-Handstück ist der Weg zum strahlenden Lächeln so bequem und einfach wie nie. Für den perfekten Flow sorgen u.a. das geringe Verstopfungspotenzial aufgrund der perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten, die volle maschinelle Aufbereitbarkeit und das ergonomisch gestaltete, perfekt ausbalancierte Handstück*. Und das Beste: Durch das Wechselkammerprinzip können die Behälter vor der Behandlung mit Pulver befüllt und während der Behandlung einfach und schnell gewechselt werden.



DREHBARE SPITZE UM 360 GRAD

Die Spitze ist um 360 Grad drehbar und ermöglicht so ein besonders ergonomisches Arbeiten.



WECHSELKAMMERPRINZIP

Besonders leicht zu wechseln mit dem Bajonett-Verschluss – auch während der Behandlung. Arbeitsunterbrechungen oder Leistungsabfall aufgrund geringen Füllstandes sind damit ausgeschlossen. Auch kann bedarfsorientiert mit unterschiedlichen Pulvern gearbeitet werden.



VORBEREITUNG DER BEHÄLTER

Aufgrund des sicheren Ventilverschlusses können die Behälter vorab befüllt werden. Dabei ermöglichen die cleveren Ablagen eine flexible Befüllung und Lagerung.

HANDSTÜCK UND EINZELTEILE KOMPLETT MASCHINELL AUFBEREITBAR

Alle einzelnen Elemente des Handstücks sind aus temperaturbeständigem Kunststoff. Und damit bequem thermodesinfizier- und autoklavierbar.



*Verfügbar für Turbinenkupplungen von KaVo, Sirona, W&H, BienAir und NSK.
Bitte beachten: Düse von MyLunos momentan ausschließlich für die supragingivale Behandlung verfügbar. Perio-Düse für den subgingivalen Einsatz bald erhältlich.



DIE STARKEN SANFTEN: LUNOS® PULVER UND PASTEN.



LUNOS® PROPHYLAXEPULVER GENTLE CLEAN

Für die supragingivale, schnelle und effektive Reinigung und Entfernung von extrinsischen Verfärbungen.

- Innovativer Abrasivkörper Trehalose:
 - Korngröße ca. 65 µm
 - beste Reinigungseigenschaften bei maximaler Oberflächenschonung
 - leicht süßer Geschmack
 - nicht schleimhautreizend
- Beste Wasserlöslichkeit:
 - hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
 - schont die Sauganlage
- Ergonomische Flasche mit Einhandkipphebelverschluss

Geschmacksrichtungen: Neutral, Orange und Spearmint
Verkaufseinheit: 4x 180 g



LUNOS® PROPHYLAXEPULVER PERIO COMBI

Für die subgingivale und supragingivale Reinigung. Ideal für den Recall. Entfernt Biofilm schnell, effektiv, gründlich und trotzdem sanft.

- Innovativer Abrasivkörper Trehalose:
 - Korngröße ca. 30 µm
 - beste Reinigungseigenschaften bei maximaler Oberflächenschonung
 - leicht süßer Geschmack
 - nicht schleimhautreizend
- Beste Wasserlöslichkeit:
 - rückstandsfreies Auflösen in der parodontalen Tasche
 - hinterlässt keine Pulverrückstände im Patientenmund
 - schont die Sauganlage
- Ergonomische Flasche mit Einhandkipphebelverschluss

Geschmacksrichtung: Neutral
Verkaufseinheit: 4x 100 g



LUNOS® POLIERPASTE TWO IN ONE

Die innovative Two-in-One-Lösung: entfernt Verfärbungen und poliert in einem. Spart Zeit und ist dennoch substanzschonend und gründlich.

- Stufenlos abnehmende Abrasivität der Paste durch selbstreduzierende Polierpartikel
-
- Für jeden Behandlungsbedarf einsetzbar
 - Effektive Reinigung und Politur dank innovativem Abrasiv- und Polierkörpersystem. Hydroxylapatit unterstützt die Remineralisierung
 - Besonders substanzschonend, RDA 28*
 - Geschmacksrichtung Mint enthält zusätzlich Natriumfluorid zur Unterstützung der Remineralisierung

Geschmacksrichtungen: Neutral, Orange und Mint
Verkaufseinheit: 1x 100 g



LUNOS® POLIERPASTE SUPER SOFT

Nachhaltig schonende Feinpolitur, auch auf besonders empfindlichen Oberflächen.

- Kann universell eingesetzt werden, auch auf Implantaten, KFO-Apparaturen und prothetischen Versorgungen
- Erzeugt glatte, hochglänzende Oberflächen, neue Beläge lagern sich nicht so schnell an
- Hydroxylapatit reinigt und poliert äußerst sanft und unterstützt die Remineralisierung
- RDA < 5*

Geschmacksrichtungen: Neutral und Orange
Verkaufseinheit: 1x 50 g

*Gebrauchsanweisung beachten!

VOR FREUDE STRAHLEN MIT DEN LUNOS® PROPHYLAXE-PRODUKTEN.



LUNOS® MUNDSPÜLLÖSUNG

Gebrauchsfertige Mundspüllösung zum Schutz von Zahnfleisch und Zähnen.

- Beugt bakteriell bedingten Entzündungen der Mundschleimhaut und des Zahnfleisches vor
- Hemmt das Wachstum plaquebildender, pathogener und geruchsbildender Keime
- Alkoholfrei – besonders schonend bei gereiztem und entzündetem Zahnfleisch
- Zuckerfrei, mit Xylitol

Verkaufseinheit: 1x 400 ml, 1x 2,5 Liter
Dosierpumpe für die 2,5 Literflasche extra erhältlich



LUNOS® FLUORIDLACK

Zur Desensibilisierung und zum Schutz empfindlicher Zahnflächen mit Natriumfluorid. Lässt sich mühelos dünn auftragen und ist dadurch besonders ergiebig.

- Zahnfarbener Lack, keine kosmetischen Beeinträchtigungen für den Patienten
- Einfach aufzutragen
- Haftet zuverlässig auf feuchten Oberflächen
- Enthält 22600 ppm Fluorid
- Enthält Xylitol

Verkaufseinheit: 1x 10 ml



LUNOS® PROPHY-KISSEN

Zur sicheren und komfortablen Lagerung des Kopfes. Unterstützt Hals und Nacken.

- Mittels Klettband einfach und schnell an der Kopfstütze der Behandlungseinheit zu fixieren
- Der viscoelastische Schaumstoff wirkt druckentlastend, reagiert auf Körperwärme und passt sich so individuell an jeden Patienten an
- Weicher, hautfreundlicher und wasserdichter Bezug
- Abwaschbar und desinfizierbar

Verkaufseinheit: 1 Stück



LUNOS® PROPHY-WELNESSTUCH

Erfrischendes, getränktes Frotteetuch, ideal für die Gesichtereinigung nach der Prophylaxebehandlung.

- Individueller Service für den Patienten
- Heiß- und Kaltanwendung möglich
- Pflegend, mit Aloe Vera
- Alkoholfrei

Verkaufseinheit: 50 Tücher einzeln verpackt



LUNOS® FLUORIDGEL

Zur intensiven Kariesprophylaxe mit Natriumfluorid. Besonders geeignet zur Anwendung nach professioneller Zahnreinigung.

- Schützt und stärkt den Zahnschmelz
- Unterstützt die Remineralisierung
- Hemmt die Plaqueneubildung
- Einfach und schnell aufzutragen
- Enthält 12300 ppm Fluorid

Verkaufseinheit: 1x 250 ml



LUNOS® FISSURENVERSIEGELUNG

Zur ästhetisch hochwertigen Versiegelung von Fissuren und Schmelzdefekten auf Kompositbasis.

- Feuchtigkeitstolerant und hydrophil
- Applikation auf feuchten oder leicht angetrockneten Zahnoberflächen, effektive Benetzung des Zahnschmelzes
- Exzellente Fließeigenschaften, sehr hohe Haftung am Zahnschmelz
- Lichthärtend
- Abrasionsstabil, hochgefüllt

Erhältlich in:
• Clear (ohne Fluorid, speziell zur asthetischen Versiegelung)
• Opaque (mit Fluorid, für dauerhaften Schutz)
Verkaufseinheit: 2x 1,5 g Spritzen



LUNOS® PROPHY-RING

Zur einfachen Applikation der Polierpaste für eine optimale Handhabung. Flexible Ringgröße.

- Das innovative Polierpastenbehältnis passt sich an jede Arbeitsweise an
- Ergonomisch geformter Ring für höchsten Tragekomfort
- Aufbereitbar
- Das kantenfreie Polierpastenbehältnis lässt sich nach der Behandlung besonders leicht reinigen

Verkaufseinheit: 8 Stück

JEDES STRAHLENDE LÄCHELN HAT EINEN GUTEN GRUND. BEI LUNOS® GLEICH VIER.

- 1 | Prophylaxe mit System. Schnell, effektiv und bequem in der Anwendung. Für Zahnarzt, Prophylaxe-Spezialisten und Patienten.
- 2 | Premium-Prophylaxe-Lösung mit umfassendem Produktportfolio vom Handstück über Pulver und Pasten bis hin zum Wellnesstuch.
- 3 | Erfüllung höchster medizinischer Ansprüche bei Produktleistung und Inhaltsstoffen.
- 4 | Schmerzarme Behandlungskonzepte und bestmöglicher Patientenkomfort.

WWW.LUNOS-DENTAL.COM

DÜRR DENTAL SE
Höpfigheimer Str. 17
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
www.duerredental.com
info@duerrdental.com

 **DÜRR
DENTAL**
DAS BESTE HAT SYSTEM